



# 醫事檢驗科公告

2023/06/02

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科共 4 項快篩檢驗項目變更操作儀器

執行日期：2023/07/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

執行方式：

1. 因應儀器合約更新，新增 SD BIOSENSOR STANDARD F200 Analyzer，快篩檢驗項目整合，異動檢驗項目如下表：

檢驗代碼	項目名稱	異動前儀器/方法學	異動後儀器/方法學
66431	Influenza A And B Ag	Sofia / Fluorescent Immunoassay (FIA)	STANDARD F200 / Fluorescent Immunoassay (FIA)
66434	Adenovirus Ag (Respiratory) Rapid Test	Immune-chromatographic test, ICT	STANDARD F200 / Fluorescent Immunoassay (FIA)
66439	RSV screening test	無	STANDARD F200 / Fluorescent Immunoassay (FIA)
66993	Gr.A Strep. Rapid Test	Sofia / Fluorescent Immunoassay (FIA)	STANDARD F200 / Fluorescent Immunoassay (FIA)

2. 檢驗方法變更，報告內容及採檢部位變更

檢驗代碼	項目名稱	可報告內容	採檢部位	Sensitivity	Specificity
66431	Influenza A And B Ag	A: Negative、Positive B: Negative、Positive	<u>Nasopharyngeal swab</u> 鼻咽拭子	A : 97.0% B : 94.3%	A : 97.6% B : 97.6%
66434	Adenovirus Ag (Respiratory) Rapid Test	Negative、Positive	<u>Nasopharyngeal swab</u> 鼻咽拭子	-	-

檢驗代碼	項目名稱	可報告內容	採檢部位	Sensitivity	Specificity
66439	RSV screening test	Negative、Positive	<u>Nasopharyngeal swab</u> 鼻咽拭子	98.1%	100%
66993	Gr.A Strep. Rapid Test	Negative、 <u>Equivocal</u> 、Positive	Throat swab 咽喉拭子	93.3%	95%

\* Equivocal : If COI (cutoff index) value between 1.0~3.0, then bacterial culture test is recommended.

2.1. 呼吸道疾病檢測：Nasopharyngeal swab (NPS, 鼻咽拭子) 採檢 鼻咽部位，可採檢 1 支 NPS 檢體進行 3 項檢測（不接受加驗）。

3. 注意事項：送檢流程、報告時間及危急值等，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科門急診鏡檢組組長 黃玉鳳〈台北院區分機：2290〉

醫事檢驗科門急診鏡檢組組長 王家瑄〈淡水院區分機：2462〉